

## CONTOUR®PLUS 血糖儀



## 僅使用 CONTOUR®PLUS 試紙

灰色方形末端：  
把這個末端插入試紙接口。

樣本尖端：  
在這裡抽取血樣。



請參閱您的 CONTOUR®PLUS 使用指南和採血器插頁以瞭解完整的說明。

**警告：**  
每次進行測量、操作血糖儀、採血器和試紙前後，請用肥皂和清水仔細清洗雙手。


**注意事項：**您的套件隨附的採血器僅供單名患者自我檢測使用。由於可能造成感染風險，不得用於超過一人。

## 基本測量 - 指尖

1. 取下採血器封蓋。
2. 旋轉 ¼ 圈，擰鬆採血針上的圓形保護蓋，但不要把它取下來。



3. 將採血針牢固地插入採血器中，直到採血針推不動為止。

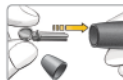

4. 擰掉採血針上的圓形保護蓋。



5. 放回封蓋。



6. 調整封蓋調節刻度盤，設定您認為最佳的穿刺深度。



7. 將試紙的灰色方形末端插入血糖儀的試紙接口。



血糖儀將會開啟，並且血糖儀顯示幕上會出現閃爍的血滴圖示。血糖儀現在已準備就緒，可開始進行測試。

8. 將採血器緊緊地按在穿刺部位上並按釋放鈕。



朝穿刺部位方向輕撫手和手指，有利於形成血滴。

9. 立即用試紙尖端去碰觸血滴。

把試紙置於血滴中，直到血糖儀發出信號聲。如果第一滴血不夠，血糖儀可能會發出兩次信號聲。您有大約 30 秒的時間將更多血液吸到同一張試紙內。測量結果會在倒數五秒鐘以後顯示。



指尖檢測

10. 若要關閉血糖儀，請取出試紙。



按醫用廢棄物處理用過的試紙，或者遵循專業醫護人員的建議處理。

## 注意事項：

- 您的套件中隨附的採血器不適於專業醫護人員使用。由於可能造成感染風險，不得用於超過一人。
- 要將採血針從採血器取下，請參閱採血器插頁內的詳細說明。
- 採血器圖樣僅為圖解用途。

需要幫助嗎？香港 (852) 8100 6386 - HK,  
+65 6202 4270 - SG 或 (84.8)1800588895,  
(84.8) 3929 3777 - VN

www.diabetes.ascensia.com

### 警告：潛在生物危害

所有的血糖測量系統皆被視為具有生物危害性。

對多名患者使用本系統的專業醫護人員或個人應遵守由其醫療機構核准的感染控制程序。

所有接觸過人體血液的產品或者物品，即使清潔過，也應當作為有可能傳播傳染性疾病來處理。

使用者應遵守為了預防在醫護環境中經由血液傳播的傳染性疾病，避免接觸有潛在傳染性的人體樣本的建議。

如需關於專利和相關許可的資訊，請瀏覽  
[www.patents.ascensia.com](http://www.patents.ascensia.com)

© 2017 Ascensia Diabetes Care Holdings AG (健緯醫療保健控股公司) 版權所有。

Ascensia、Ascensia Diabetes Care 標誌、Clinilog、Contour、Glucofacts 和 No Coding (免調碼) 標誌是 Ascensia Diabetes Care Holdings AG (健緯醫療保健控股公司) 的商標和/或註冊商標。所有其他商標是其各自所有者的財產。

## 使用進階模式

### 將血糖儀設為進階模式

若要將血糖儀設為「進階模式」，充分利用用餐標記及其他可用的功能：

1. 按 **M** 鍵以開啟血糖儀。
2. 按住 **▲** 或 **▼** 並保持 3 秒鐘。
3. L-1 將會閃爍。
4. 按 **▲** 或 **▼** 以切換到 L-2。
5. 按 **M** 鍵完成設定。



瞭解這些額外的功能如何幫助您管理糖尿病。

請致電 香港 (852) 8100 6386 - HK,  
+65 6202 4270 - SG 或 (84.8)1800588895,  
(84.8) 3929 3777 - VN 致電客戶服務

[www.diabetes.ascensia.com](http://www.diabetes.ascensia.com)

進行測試並看到結果之後，使用顯示屏上的標記：

標記結果 >	您將會看到 >	設定 >	您將會看到 >	代表含意 >	使用提醒
餐前 標記記錄用餐前的測量結果。 按 <b>▲</b> 或 <b>▼</b> 鍵	(閃爍)	按 <b>M</b> 鍵		結果標記為餐前測量。再按 <b>M</b> 以設定餐後測量提醒。	提醒信號聲響起時，血糖儀開啟，您將會看到餐前測量結果。  按任何按鈕一次就可以停止提醒，按兩次則關閉血糖儀。再進行一次血液檢測，用 <b>立</b> 餐後標記進行標記（參照左側圖表）。
餐後 標記記錄用餐後的測量結果。 按 <b>▲</b> 或 <b>▼</b> 鍵	(閃爍)	按 <b>M</b> 鍵		結果標記為餐後測量。	
日誌 標記記錄獨特的或者在某方面不相同的結果。 按 <b>▲</b> 或 <b>▼</b> 鍵	(閃爍)	按 <b>M</b> 鍵		記憶中的結果標記為獨一無二。您應該在記錄簿中註記這個結果。	

設定提醒（預設 2 小時）以進行餐後測量。請參閱使用說明書中有關如何使用標記以及如何調整提醒次數的完整說明。

## 錯誤代碼和符號

請參閱使用說明書中的完整清單。

E1	溫度超出範圍。
E2	完全浸濕試紙時出現問題。使用新試紙重新測量。
E3	血糖儀感測到試紙已經使用過或者使用的核對液不對。使用新試紙重新測量。
E11	結果異常。使用新試紙重新測量。

健緯醫療保健香港有限公司  
九龍觀塘道388號  
創紀之城第一期第一座31樓  
12-13室  
電話: (852) 8100 6386  
傳真: (852) 2320 7022

Ascensia Diabetes Care  
Singapore Pte Ltd  
600 North Bridge Road  
#06-01 Parkview Square  
Singapore 188778  
Tel: +65 6202 4270  
Email: [diabetescare@ascensia.com](mailto:diabetescare@ascensia.com)

Nhà nhập khẩu và phân phối  
Công Ty TNHH Dược Phẩm & Trang Thiết Bị Y Tế Hoàng Đức  
12 Nguyễn Hiền, Phường 4, Quận 3  
TP Hồ Chí Minh, Việt Nam  
Tel: (84.8)1800588895, (84.8) 3929 3777

Ascensia Diabetes Care Holdings AG  
Peter Merian-Strasse 90  
4052 Basel, Switzerland  
[www.diabetes.ascensia.com](http://www.diabetes.ascensia.com)

ASCENSIA  
Diabetes Care



85877453 Rev. 04/17